


# Тонкие звуководы

## Очистка тонких звуководов и сводов

- 1 Перед чисткой снимите тонкие звуководы со слуховых аппаратов, открутив их против часовой стрелки.
- 2 Протрите тонкие звуководы и свода влажной тканью.
- 3 Чтобы очистить тонкий звуковод от влаги и мусора, протолкните черный чистящий стержень через тонкий звуковод, начиная с конца напротив свода.

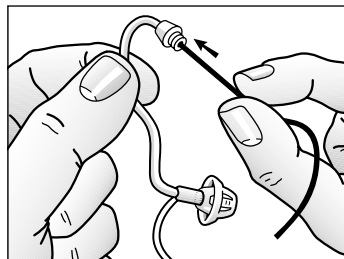


- i** Системы тонких звуководов и сводов следует заменять, когда компоненты становятся жесткими, хрупкими или перекручиваются.

## Замена тонких звуководов

- 1 Снимите тонкие звуководы со слуховых аппаратов, открутив их против часовой стрелки.
- 2 Прикрепите сменный тонкий звуковод посредством завинчивания по часовой стрелке.

Не снимайте адаптер

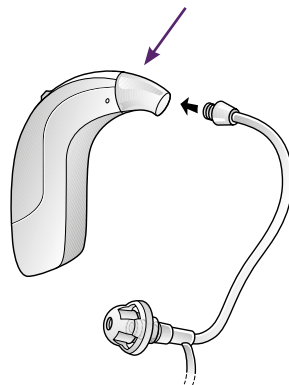

## Замена сводов

Рекомендуется, чтобы замену свода производил ваш специалист по слухопротезированию, поскольку неправильная замена купола может привести к выпадению свода из уха.

Контактная информация аудиолога: