

# Программная кнопка

- Ваш слуховой аппарат может иметь до 4 различных программ. Программы можно выбрать с помощью кнопки в верхней части, на задней панели вашего слухового аппарата.
- Для изменения программ нажмите кнопку. Количество звуковых сигналов указывает на программу, в которой вы находитесь.  
1 звуковой сигнал = программа 1  
2 звуковых сигнала = программа 2 и т. д.
- Программы циклически переходят от 1 к 2 к 3 к 4, затем обратно к 1.
- Когда вы выключаете и снова включаете слуховой аппарат, он всегда возвращается к программе 1.



## Записывайте свои программы здесь

	Название программы	Когда использовать
<b>Программа 1</b>		
<b>Программа 2</b>		
<b>Программа 3</b>		
<b>Программа 4</b>		

Ваш слуховой аппарат настроен на звуковой сигнал при изменении между программами.

Да

Нет

Правильный выбор для  
(Национальной службы здравоохранения)

danalogic GN

Контактная информация аудиолога: