

Включение/выключение и Замена батареек





Включение и выключение

Включение слухового аппарата

Полностью закройте батарейный отсек, чтобы включить слуховой аппарат.

Выключение слухового аппарата

Откройте батарейный отсек до щелчка, чтобы выключить слуховой аппарат.

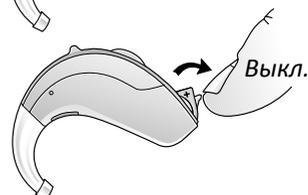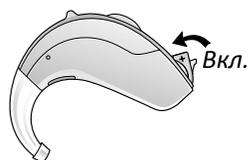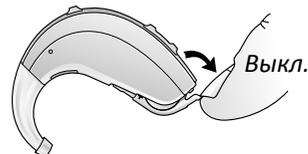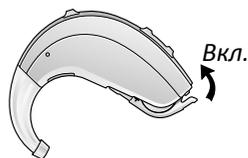


Замена батареек

Размер и цвет батареек:

В случае низкого заряда батареи

- Слуховой аппарат подает звуковой сигнал, когда заряд батареи становится слишком низким.
- Сигнал будет повторяться каждые 15 минут, пока слуховой аппарат автоматически не выключится.

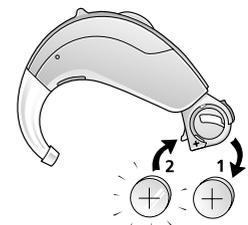

Правильный выбор для
(Национальной службы здравоохранения)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 06.49 A 6.2018

danalogic GN

Включение/выключение и замена батареек (продолжение)

Замена батареек



- Снимите липкую наклейку с новой батарейки.
- Откройте батарейный отсек.
- Извлеките севшую батарейку, потянув ее на себя вверх.
- Вставьте новую батарейку на место. Убедитесь, что плоская сторона (с маркировкой+) обращена вверх.

i Для экономии заряда батареи обязательно выключайте слуховой аппарат, когда вы им не пользуетесь.

Ваш слуховой аппарат настроен на звуковой сигнал, когда необходимо заменить батарейку.

Да

Нет

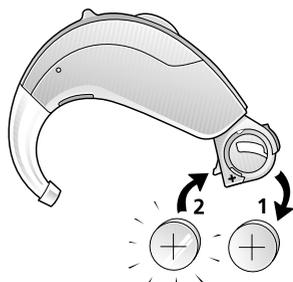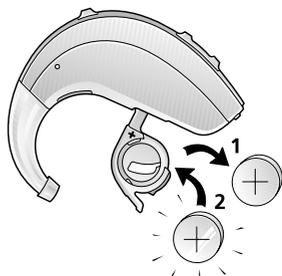

Контактная информация аудиолога:

Правильный выбор для
(Национальной службы здравоохранения)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 06.49 A 6.2018

danalogic GN