


# Regulator głośności - przełącznik

## Regulator głośności (opcjonalnie)

Regulacja głośności pozwoli w Twoich aparatach słuchowych zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

- 1 Aby zwiększyć głośność, naciśnij górny koniec przełącznika.
- 2 Aby zmniejszyć głośność, naciśnij dolny koniec przełącznika.

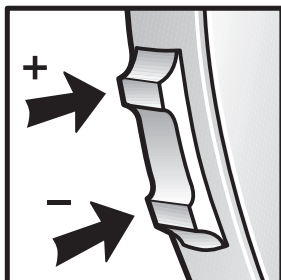

Gdy głośność zostanie zwiększona lub zmniejszona, będzie słyszalny sygnał dźwiękowy dla każdej przyrostowej. Po osiągnięciu górnej lub dolnej granicy zakresu głośności sygnał dźwiękowy zmieni ton. Podczas dopasowywania aparatu słuchowego protetyk słuchu wybierze dla Ciebie optymalne ustawienie głośności. Po włączeniu aparatu słuchowego głośność będzie miała optymalne ustawienie.

Twój aparat słuchowy został skonfigurowany tak, aby emitował sygnał dźwiękowy podczas regulacji głośności.

Tak

Nie

Dane kontaktowe audiologa: