



ادخال اور ہٹانے Earmold

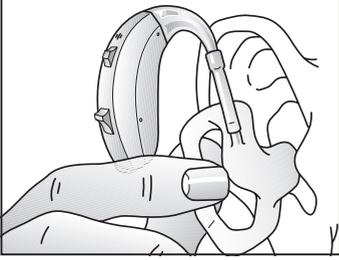


1. آپ کے درمیان ایک کی Earmold انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور اس کی آواز نکلنے کے کان میں آپ کی کینال۔

2. آپ کے تمام Earmold کان میں دو سلائڈز کے ایک بزرگ، Twisting تحریک کے ساتھ ہے۔

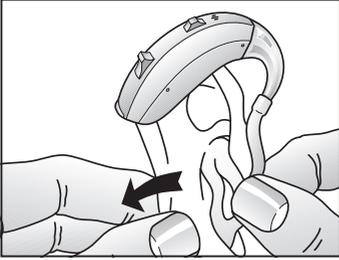

3. نے حصہ Earmold نرمی سے پیچھے اور فارورڈز تاکہ اس کے اوپر کے کھال کے پیچھے گنا Tucks آپ کے کان کینال۔


4. بڑھائیں Earmold اور سے اسی طرے سے دبائیں اور پریس کو یقینی بنانے کی کان میں یہ صحیح ہے۔ آپ کے منہ بند کر سکتے ہیں۔ اور چین شمول

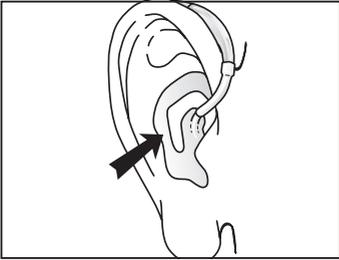

5. اس امر کو یقینی بنائیں کہ سماعت الہ کان منیجرز ہے۔ پیچھے

جو کی جانب سے آسان طریقہ دریافت کی ایک ہو سکتی ہے۔ لیکن Snugly کی سماعت کی باقاعدہ ادغام کے ساتھ آلات کو فٹ خوشی سے ہے۔ اگر آپ سماعت آلات کی وجہ اشتعال کی کانوں سماعت کی دیکھ بھال کی پیشہ ورانہ۔

صفائی Earmolds

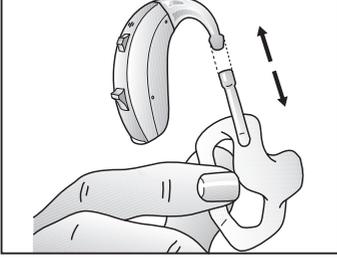


1. Tubing سماعت سے منسلک ایک دور کرنے اور Earmold آلات قبل ازیں صفائی.

2. صابن کا استعمال Earmold نرم 2 صاف پانی کے ساتھ اور خصاب سسم


3. اور صفائی کے بعد، خشک Earmolds دور

سے پوری طرح 3 کسی بقیہ پانی اور ملے سے ہوائی Tubing Utilising گٹھی، تار لوپ یا پھینٹنے کی سرگرمی سے پانی کو ہٹانے کے Earmold

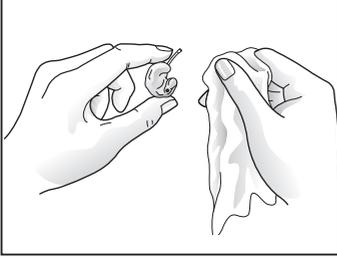

Earmold بن Tubing سخت، نازک وقت ⓘ

پر یا Discolored ٹیوب کے حوالے سے تبدیلیوں سے رابطہ کریں. آپ کی سماعت کی دیکھ بھال کی پیشہ ور

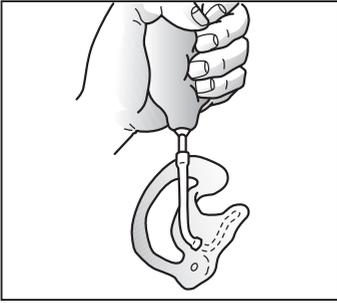

رابطہ کی تفصیلات: Audiologist