

Поставяне на вашият слухов апарат- тънка тръбичка

- 1 Поставете слуховият апарат зад
вашето ухо с мекия накрайник
насочен към главата.



- 2 Вкарайте леко мекото връхче в
ушния канал с крайчето сочещо
назад.



- 3 Подгънете крайчето назад и го
поставете във вдлъбнатината в
средата на ушната мида.



- 4 Правилно поставен слухов
апарат.





Моля, обърнете внимание: използвайте дясната ръка да поставите слухов апарат на дясното ухо и лявата ръка да поставите слухов апарат на лявото ухо.

Почистване на вашия слухов апарат



- 1 Отвинтете тръбичката в посока на часовниковата стрелка в предната част на куката на слуховия апарат. Куката съдържа филтър, през който вие не можете да прекарате жичката за почистване.
- 2 Внимателно мушнете жичката за почистване през тръбичката от горе на долу. Издърпайте жичката за почистване от другия край.
- 3 Премахнете всички нечистотии от края на тръбичката и избършете купола, за да се отстрани излишното количество ушна кал.
- 4 Внимателно мушнете тръбичката обратно през куката и я завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, докато тръбичката достигне първоначалното си положение. Внимавайте да не прегънете или да не презатегнете тръбичката.

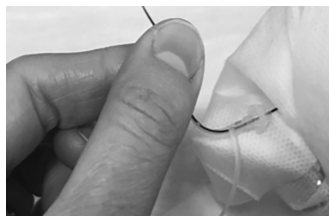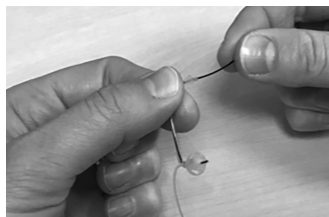

Моля, обърнете внимание: Тръбичките трябва да се сменят на всеки 4-6 месеца

Правилния избор за NHS (Национална здравна служба)

danalogic GN