


Dopasowanie aparatu słuchowego - Slim Tube

- 1 Należy umieścić aparat słuchowy za uchem, miękka końcówka powinna być skierowana w stronę głowy.



- 2 Należy delikatnie wepchnąć miękką końcówkę do przewodu słuchowego, jej ogon powinien być skierowany do tyłu.

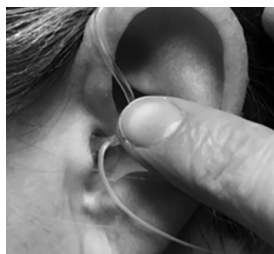

- 3 Należy złożyć jego ogon do tyłu do wewnątrz ucha.




- 4 Prawidłowo zamontowany aparat.





Należy pamiętać, że dopasowując prawy aparat słuchowy, należy użyć prawej ręki, a jeśli dopasowuje się lewy aparat słuchowy, należy użyć lewej ręki.

Czyszczenie aparatu słuchowego

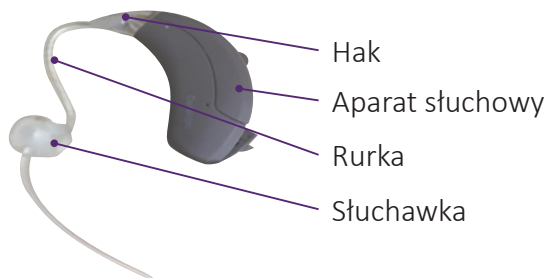

- 1 Należy odkręcić przewód zgodnie z ruchem wskazówek zegara z PRZODU haka na aparacie słuchowym. Hak zawiera filtr, przez którego nie można przepchnąć przewodu czyszczącego.
- 2 Należy delikatnie przepchnąć przewód czyszczący przez rurkę od góry do dołu. Należy przeciągnąć drut czyszczący do samego końca.
- 3 Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z końca rurki i wytrzeć słuchawkę w celu usunięcia nadmiaru wosku.
- 4 Należy delikatnie wcisnąć rurę z powrotem na hak, a następnie obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż rurka powróci do pierwotnej pozycji. Należy uważać, aby nie zagiąć lub nadmiernie dokręcić rurki.

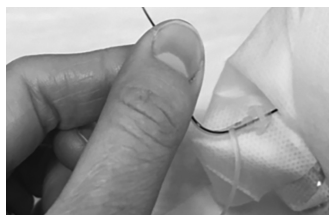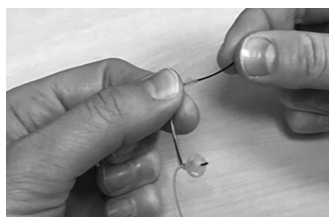

Uwaga: Rurkę należy wymieniać co 4-6 miesięcy