

# Przycisk programujący

- Twój aparat słuchowy może mieć do 4 różnych programów. Programy można wybierać za pomocą przycisku na górze, z tyłu aparatu słuchowego.
- Aby zmienić program należy nacisnąć przycisk. Liczba słyszanych sygnałów dźwiękowych wskazuje program, jaki został wybrany.

1 sygnał dźwiękowy = Program nr 1,  
2 sygnały dźwiękowe = Program nr 2  
itd.

- Programy przechodzą od nr 1 do nr 2 do nr 3 do nr 4, a następnie z powrotem do nr 1.
- Po wyłączeniu i ponownym włączeniu aparatu słuchowego zawsze powraca on do programu nr 1.



## Nagraj swoje programy tutaj

	Nazwa programu	Kiedy go używać
<b>Program nr 1</b>		
<b>Program nr 2</b>		
<b>Program nr 3</b>		
<b>Program nr 4</b>		

Twój aparat słuchowy został ustawiony tak, aby emitował sygnał dźwiękowy, gdy ustawiasz program w swoim aparacie słuchowym.

Tak

Nie

Dane kontaktowe audiologa: