

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਟਨ

- ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਉਪਰ ਦੱਤਿ ਬਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਪਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਚਿ ਹੋ।

1 ਬੀਪ = ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1

2 ਬੀਪਾਂ = ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 2, ਆਦਿ।

- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4, ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਵਾਪਸ
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ।



ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਕਿਾਰਡ ਕਰੋ

	ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ	ਕਦੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1		
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 2		
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 3		
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 4		

ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਚਿ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਅਰਗਿ ਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਂ

ਨਹੀ

ਆਡਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ: