# 开机/关机和 更换电池


## 开机和关机

## 开启助听器

完全合上电池仓即可让助听器开机。

# 关闭助听器

打开电池仓直至发出咔嗒声,即可让助听器关机。

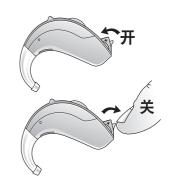



## 更换电池

# 电池电量不足

- · 电池电量太低时,助听器会发出 蜂鸣声。
- · 蜂鸣声会每 15 分钟重复一次, 直至助听器自动关机。





danalogic GN

# 开机/关机和更换电池(续)

## 更换电池

- 撕下新电池上的不干胶标签。
- 打开电池仓。
- 向上拉旧电池将其取出。
- · 将新电池插入到位。确保平的一面(标有 +)朝上。
- **1** 为了省电,请确保在不使用助听器时将其关机。

助听器已被设为在需要更换电池时发出蜂鸣声。







听觉矫正专家联系方式: