

Regulacja głośności - koło

Regulacja głośności znajduje się z tyłu aparatu słuchowego nad komorą baterii i poniżej przycisku programowania. Regulator głośności jest kołem i jest oznaczony jako 1 do 4.


Nr 1 to najcichszy poziom, a nr 4 jest najgłośniejszym poziomem.

jest o odpowiednim poziomie głośności dla Ciebie.

Chociaż w różnych sytuacjach słuchowych można regulować poziom głośności.

- **ABY ZMNIJSZYĆ** głośność
- obróć koło **w dół**
- **ABY ZWIĘKSZYĆ** głośność
- obróć koło **do góry**

Koło głośności zatrzyma się po osiągnięciu górnej i dolnej granicy zakresu głośności.

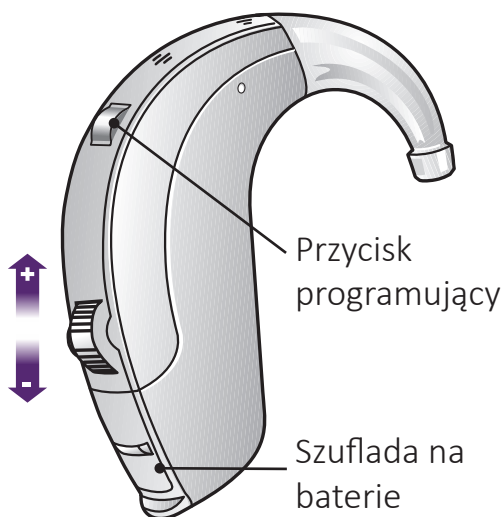

Dane kontaktowe audiologa: