

مفتاح التحكم في مستوى الصوت - البكرة

يوجد مفتاح التحكم في مستوى الصوت في الجزء الخلفي من جهاز السمع لديك أعلى درج البطارية وأسفل زر البرنامج. ويكون مفتاح التحكم في مستوى الصوت على شكل بكرة ومُعَلَّمة بأرقام من 1 إلى 4.

1 هو أقل مستوى صوت و4 هو الأعلى.

مستوى الصوت المناسب لك.

إلا أنك قد تجد أنه من المفيد ضبط مستوى الصوت في مختلف ظروف الاستماع.

- **لخفض مستوى الصوت** – أدير البكرة لأسفل
- **لزيادة مستوى الصوت** – أدير البكرة لأعلى

ستتوقف بكرة الصوت عند الوصول إلى الحد الأعلى والحد الأسفل لنطاق الصوت.



تفاصيل الاتصال بمتخصص السمع: