

रिचार्जबल श्रवणयन्त्रको समस्या निवारण निर्देशिका

लक्षण	कारण	सम्भावित उपचार
आवाज छैन	• श्रवण यन्त्र खोलिएको छैन	• 5 सेकेन्डको लागि बटन होल्ड गर्नुहोस्
	• श्रवण यन्त्रको चार्ज सकिएको छ	• आफ्नो चार्जरलाई मेनमा प्लग गर्नुहोस् र चार्जरमा श्रवणयन्त्र राख्नुहोस्
	• ब्लक गरिएको स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड	• स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड सफा गर्नुहोस्
	• आफ्नो इयरमोल्ड ट्यूबमा कन्डेन्सेसन	• इयरमोल्डबाट आफ्नो श्रवणयन्त्र हटाउनुहोस् र पानी हटाउन इयरमोल्ड हल्लाउनुहोस्। आफ्नो श्रवण यन्त्रमा पुनः जोड्नु अघि इयरमोल्डलाई 15 मिनेटको लागि न्यानो सुख्खा ठाउँमा राख्नुहोस्
पर्याप्त आवाजमा छैन	• गलत स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड प्लेसमेन्ट	• आफ्नो स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड पुनः घुसाउनुहोस्
	• ब्लक गरिएको स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड/ डोम	• आफ्नो स्लिम ट्यूब / इयरमोल्ड सफा गर्नुहोस् / डोम बदल्नुहोस्
	• ब्लक गरिएको मोम फिल्टर	• वाक्स फिल्टर परिवर्तन गर्नुहोस्
	• तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंको श्रवणशक्ति परिवर्तन भएको छ	• आफ्नो स्थानीय श्रव्य विज्ञान विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• अत्यधिक कानको मोम	• आफ्नो जीपी वा अभ्यास नर्सलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• भोल्युम धेरै कम सेट गर्नुहोस्	• यदि तपाईंको पुश बटनमा वा बिमोर एप मार्फत उपलब्ध छ भने भोल्युम बढाउनुहोस्

समस्या निवारण निर्देशिका (जारी)

लक्षण	कारण	सम्भावित उपचार
अत्यधिक हल्ला फैलाउने / प्रतिक्रिया	• गलत स्लिम ट्यूब / कानको मोल्ड प्लेसमेन्ट	• स्लिम ट्यूब पुनः घुसाउनुहोस् / कानको मोल्ड
	• अत्यधिक कानको मोम	• आफ्नो जीपी वा अभ्यास नर्सलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• स्लिम ट्यूब / कानको मोल्ड ट्युबिङ जीर्ण वा बिग्रिएको	• आफ्नो स्लिम ट्यूब बदल्नुहोस् / आफ्नो कानको मोल्डमा ट्युबिङ परिवर्तन गर्नुहोस्
ध्वनि विकृत / होइन सफा	• अपर्याप्त इयरमोल्ड वा डोम फिट	• आफ्नो स्थानीय अडियोलोजी विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• श्रवण यन्त्र बिग्रिएको छ	• आफ्नो स्थानीय अडियोलोजी विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
	• श्रवण यन्त्र सेटिङहरू इष्टतम छैनन्	• बिमोर एप प्रयोग गरेर समायोजन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् वा आफ्नो स्थानीय अडियोलोजी विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

यदि यहाँ उल्लेख नगरिएका अन्य कुनै समस्याहरू छन् भने, कृपया आफ्नो स्थानीय श्रवण विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।



थप सहयोगको लागि, QR कोड स्क्यान गर्नुहोस् वा हाम्रो बिरामी सहायता पोर्टलमा जानुहोस्: danalogic.co.uk/patient-portal