




# Cómo reentubar el molde auricular

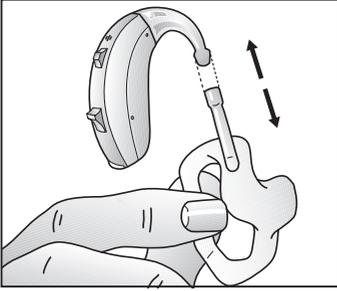


1. Retire el molde de su audífono y, a continuación, extraiga el tubo del molde auricular.

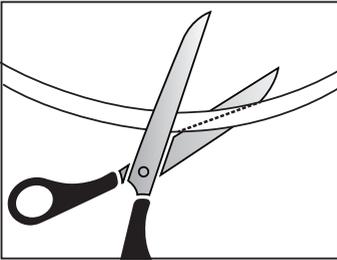

2. Corte aproximadamente los últimos 5 cm del trozo de tubo precurvado hasta obtener un extremo cónico.

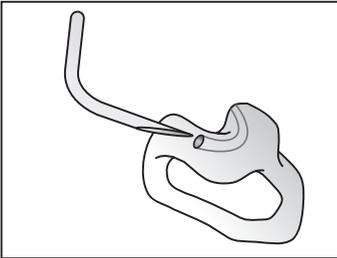


3. Introduzca el extremo puntiagudo por el orificio del molde auricular desde el exterior, tal como se muestra, hasta que salga por el otro extremo. Si tiene dos orificios en el molde, introduzca el tubo por el más grande de la parte superior.

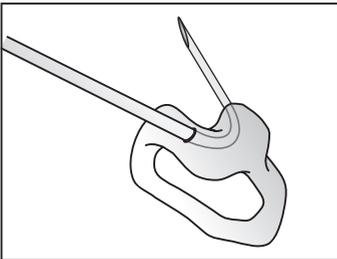


4. Tire del extremo puntiagudo del tubo a través del molde auricular hasta que el otro extremo del tubo quede vertical y quede plano contra el molde auricular.


## Cómo reentubar el molde auditivo (continuación)

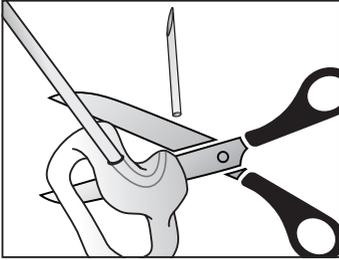

5. Corte el extremo puntiagudo lo más cerca posible del molde auricular. Asegúrese de que no queden bordes ásperos del tubo sobresaliendo, ya que esto puede causarle irritación en el oído.

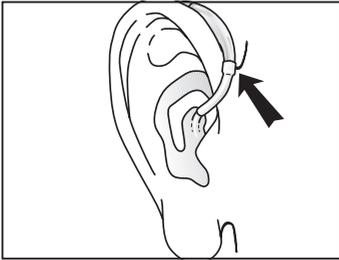

6. Ahora debe ajustar la longitud del tubo para que se adapte a su oído. Coloque el trozo de tubo antiguo (que retiró antes) junto al tubo recién ajustado, mida y corte. O colóquese el audífono sobre la oreja y marque el punto en el que se cruza con su audífono como se muestra y corte.

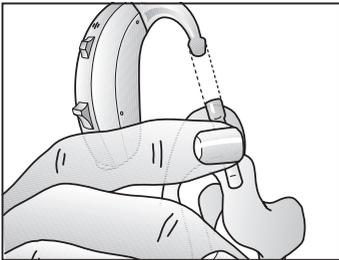

7. Para volver a colocar el audífono en el molde auricular, apriete la parte superior del tubo y junte el molde y el audífono.

**CONSEJO:** *El tubo del molde auricular puede volverse rígido, quebradizo o decolorarse con el tiempo. Normalmente se recomienda cambiarlo al menos una vez cada 6 meses. Si tiene algún problema al cambiar el tubo del molde, póngase en contacto con su servicio local de audiología.*



Para obtener más ayuda, escanee el código QR o visite nuestro portal de asistencia al paciente en: **[danalogic.es/patient-portal](https://danalogic.es/patient-portal)**