



Czyszczenie i wymiana dźwiękowód dla danalogic Actio

Czyszczenie


Najpierw przetrzyj dźwiękówód i kopułkę wilgotną szmatką. Jeśli dźwiękówód jest zatkany woskowiną lub innymi zanieczyszczeniami, usuń je z aparatu słuchowego, ostrożnie ściągnając cały dźwiękówód z aparatu słuchowego.

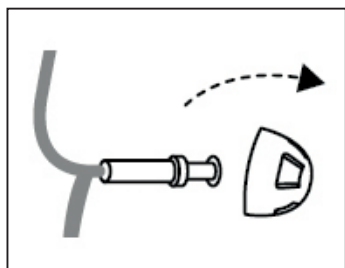

1. Następnie zdejmij kopułkę, ściągnając ją z żebrowanego końca.

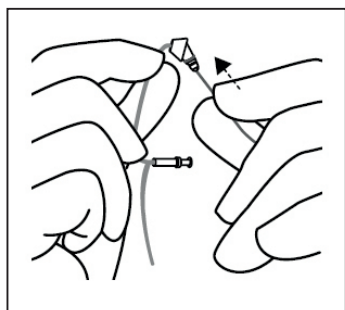


2. Teraz przełóż przewód czyszczący przez górną część dźwiękowodu, gdzie łączy się on z aparatem słuchowym. Całkowicie przeciągnij przewód czyszczący, aby w pełni usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

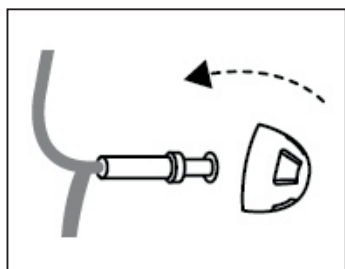


3. Teraz wciśnij kopułkę z powrotem na dźwiękówód.

Czyszczenie i wymiana dźwiękowodów dla danalogic Actio (ciąg dalszy)

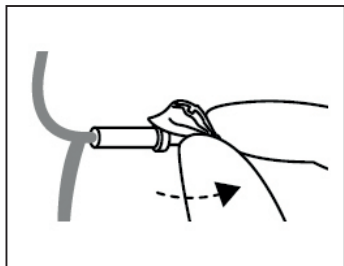

4. Sprawdź, czy kopułka jest zamocowana, ostrożnie podnosząc dolną część kopułki i sprawdzając, czy kołnierz całkowicie zakrywa żebrowany koniec dźwiękowodu.

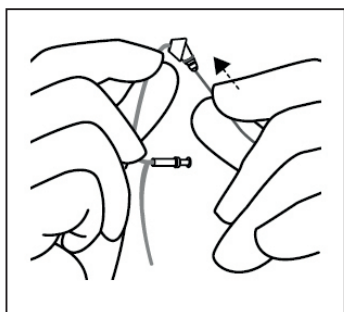

5. Na koniec wciśnij dźwiękowód z powrotem do aparatu słuchowego, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Wymiana

Jeśli musisz wymienić dźwiękowód, zdejmij cały dźwiękowód z aparatów słuchowych i zastąp go nowym, upewniając się, że dobrze się zatrzasnął. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby upewnić się, że nowa kopułka jest prawidłowo zamontowana na nowym dźwiękowodzie.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:
danalogic.co.uk/patient-portal