


تنظيف الأنابيب الرفيعة واستبدالها في أجهزة danalogic Actio


التنظيف

يمكنك أولاً مسح الأنبوب الرفيع والقبة بقطعة قماش رطبة. إذا كان الأنبوب الرفيع مسدوداً بشمع أو فضلات أخرى، فأزله من جهاز المساعدة السمعية عن طريق سحب الأنبوب كله بعناية خارج الجهاز.


١- أزل بعد ذلك القبة بسحبها خارج الطرف المضلع.

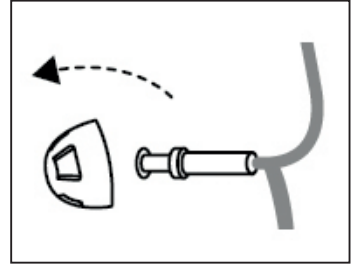

٢- ادفع الآن سلك التنظيف عبر الجزء العلوي من الأنبوب الرفيع حيث يتصل بجهاز المساعدة السمعية. مرر سلك التنظيف بالكامل لإزالة أي فضلات تمامًا.

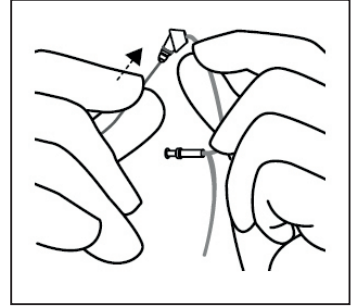


٣- ادفع الآن القبة مرة أخرى على الأنبوب الرفيع.

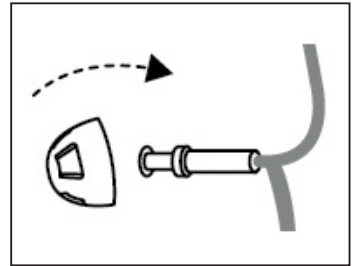


تنظيف الأنابيب الرفيعة واستبدالها في أجهزة danalogic Actio (تابع)

٤- تأكد من إحكام تثبيت القبة من خلال رفع الجزء السفلي منها بعناية، وتحقق من أن الطوق يغطي بالكامل الطرف المضلع من الأنبوب الرفيع.

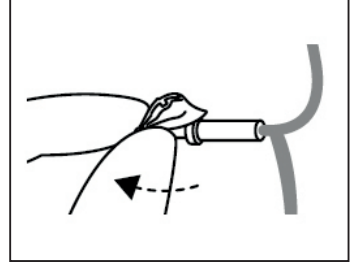

٥- أخيرًا، ادفع الأنبوب الرفيع مرة أخرى على جهاز المساعدة السمعية إلى أن تسمع صوت استقراره بإحكام في مكانه.

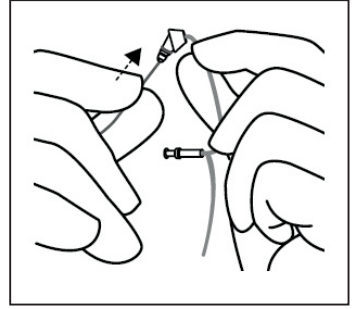

الاستبدال

إذا احتجت إلى استبدال الأنبوب الرفيع، فاسحب الأنبوب بأكمله خارج أجهزة المساعدة السمعية وركب واحدًا جديدًا بدلاً منه مع التأكد من سماع صوت استقرار الأنبوب الجديد في مكانه بإحكام. اتبع التعليمات أعلاه للتأكد من صحة تثبيت القبة الجديدة على الأنبوب الرفيع الجديد.

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: danalogic.co.uk/patient-portal

