

إدخال قالب الأذن وإزالته



لإدخال قالب الأذن، أمسكه بين إصبعي الإبهام والسبابة وضع منفذ الصوت داخل قناة أذنك.



أدخل قالب الأذن بكامل مساره في أذنك من خلال تحريكه دائريًا برفق. تأكد من دس الجزء العلوي من قالب الأذن خلف طية الجلد فوق قناة أذنك.

بمجرد استقرار القالب في مكانه، ادفع جهاز المساعدة السمعية للأمام ثم حرّكه للخلف ليستقر خلف أذنك بشكل مريح.

يرى البعض أن استخدام مرآة من شأنه المساعدة على إدخال قالب الأذن؛ ومن المقترض بعد وضعه على نحو صحيح أن يثبت بشكل محكم ومريح.

إدخال قالب الأذن وإزالته (تابع)



لإزالة قالب الأذن، ارفع جهاز المساعدة السمعية من خلف أذنك ودعه يتدلى إلى جوار أذنك.

باستخدام إصبعيك الإبهام والسبابة، ادفع القالب برفق لإخراجه من أذنك. قد تحتاج إلى لف القالب قليلاً لإخراجه بالكامل.

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئياً رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: danalogic.co.uk/patient-portal

