



# Почистване и подмяна на тънки тръбички за danalogic Actio

## Почистване


Най-напред можете да избършете тънката тръбичка и заобления накрайник с влажна кърпа. Ако тънката тръбичка е запушена с ушна кал или други остатъци, отстранете я от слуховия апарат, като внимателно издърпате цялата тръбичка от слуховия апарат.

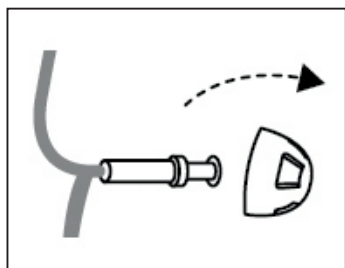

1. После отстранете заобления накрайник, като го издърпате от оребрения край.

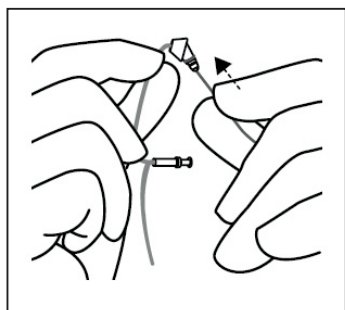


2. След това вкарайте тела за почистване през горната част на тънката тръбичка, където тя се свързва към слуховия апарат. Прекарайте тела за почистване през цялата тръбичка, за да отстраните напълно евентуалните остатъци.

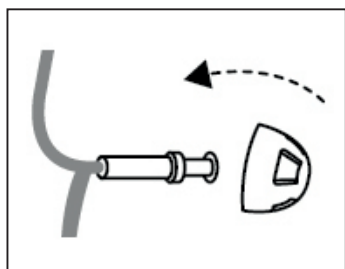


3. Сега вкарайте обратно заобления накрайник върху тънката тръбичка.

## Почистване и подмяна на тънки тръбички за danalogic Actio (продължение)

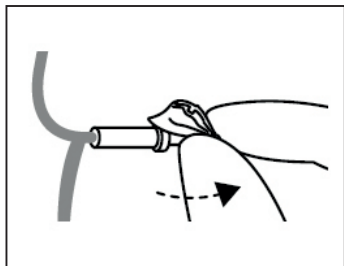

4. Проверете дали заобленият накрайник е добре закрепен, като внимателно повдигнете долната част на накрайника и се уверите, че пръстенът покрива изцяло оребрения край на тънката тръбичка.

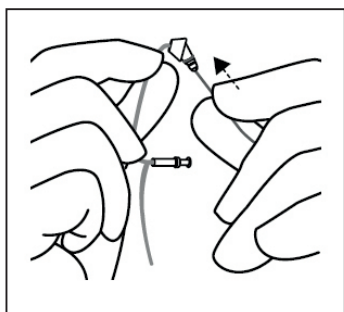

5. Накрая вкарайте отново тънката тръбичка върху слуховия апарат, докато не се фиксира с щракване на място.

### Подмяна

Ако трябва да подмените тънката тръбичка, издърпайте тръбичката изцяло от слуховия апарат и я подменете с нова, като се уверите, че се е фиксирала на място с щракване. Следвайте горните инструкции, за да гарантирате, че новият заоблен накрайник е сглобен правилно върху новата тънка тръбичка.



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)