



Čištění a výměna hadiček za danalogic Actio

Čištění


Nejdříve otřete hadičku a hlavici vlhkým hadříkem. Pokud je hadička ucpaná ušním mazem nebo jinými nečistotami, odpojte ji od sluchové pomůcky tak, že celou hadičku opatrně vytáhnete ze sluchové pomůcky.

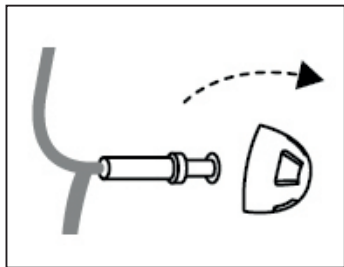

1. Pak odpojte hlavici tak, že ji vytáhnete z žebrovaného konce.

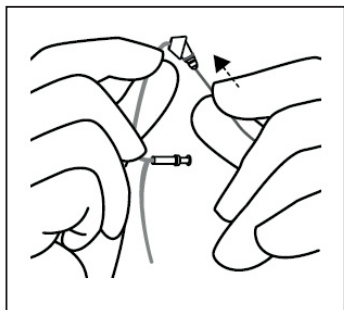


2. Nyní zastrčte čisticí drát vrchní částí hadičky, kde je připojena ke sluchové pomůcce. Prostrčte čisticí drát kompletně hadičkou, abyste zcela odstranili veškeré nečistoty.

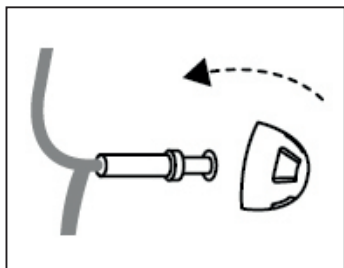


3. Nyní zastrčte hlavici zpět do hadičky.

Čištění a výměna hadiček za danalogic Actio (pokračování)

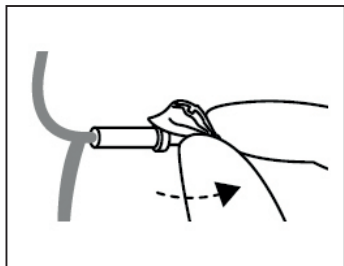

4. Zkontrolujte, že hlavice drží pevně tak, že opatrně zvednete dolní část hlavice a zkontrolujete, že límec zcela zakrývá žebrovaný konec hadičky.

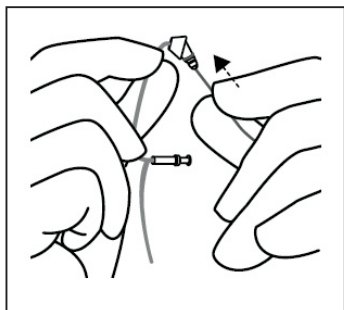

5. Nakonec zastrčte hadičku zpět do sluchové pomůcky, až pevně zapadne na své místo.

Výměna

Pokud je zapotřebí vyměnit hadičku, vytáhněte ji celou ze sluchové pomůcky a nahradte ji novou, přičemž zkontrolujte, že pevně zapadne na své místo. Řiďte se výše uvedenými pokyny, abyste zaručili, že nová hlavice pevně sedí na nové hadičce.



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:
danalogic.co.uk/patient-portal