

Tlačítko programu

- Vaše sluchadlo může mít až 4 různé programy. Programy mohou být zvoleny s použitím tlačítka na zadní straně sluchové pomůcky. Na obrázku vidíte příklad toho, kde tlačítko naleznete.
- Program změníte stisknutím tlačítka. Počet pípnutí, která uslyšíte, udává, v jakém programu se nacházíte.
1 pípnutí = Program 1
2 pípnutí = Program 2, atd.
- Programy se budou střídat v číselném pořadí. Kupříkladu programe 2 bude následovat po programu 1.
- Když svou sluchovou pomůcku vypnete a znovu zapnete, vrátí se vždy zpět k programu 1.



Tlačítko programu

Nahrávejte své programy zde:

	Název programu	Kdy použít
Program 1		
Program 2		
Program 3		
Program 4		



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:
danalogic.co.uk/patient-portal