




如何更换耳模的导音管

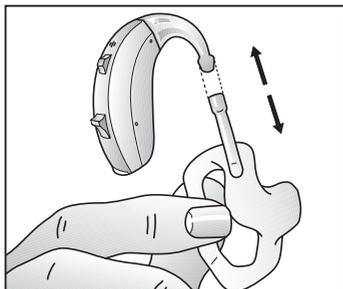


1. 从助听器上取下耳模，然后从耳模上拔出导音管。

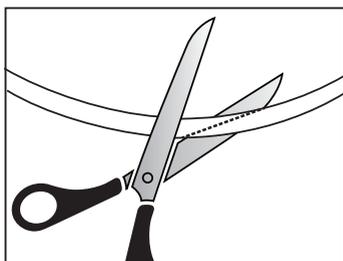

2. 将导音管预弯部分的后 5 厘米斜剪成锥形尖端。

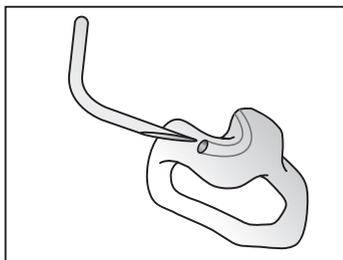


3. 如图所示，将尖端从外侧插入耳模上的通道，直至从另一端穿出来。如果您的耳模上有两个洞，将导音管从顶部较大的洞中穿过。

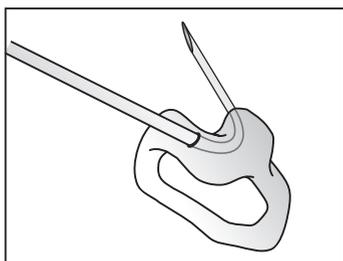


4. 将导音管的尖端拉过耳模，直至导音管的另一端垂直紧贴耳模。


如何更换耳模的导音管 (续)

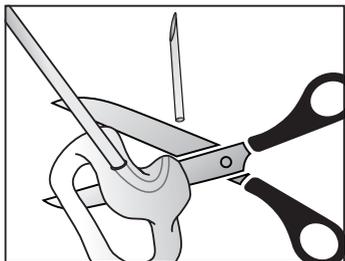

5. 从尽可能紧贴耳模的位置剪掉尖端。确保导音管没有露出粗糙的边缘，否则会刺激耳朵。

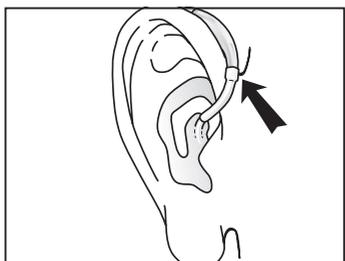

6. 现在调整导音管的长度以适合您的耳朵。对比之前取下的旧导音管长度剪断新安装的导音管。或者将助听器戴到耳朵上，在其穿过助听器的位置做上标记（如图所示），然后剪断。

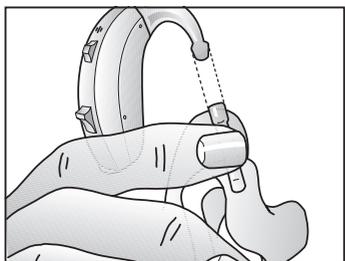

7. 要将助听器重新安装到耳模上，请挤压导音管的顶部，然后将耳模和助听器装到一起。

重要提示：耳模和导音管可能会随时间而变硬、变脆或变色。通常建议至少每6个月更换一次。如果在更换导音管时遇到任何问题，请联系您当地的听觉部门。



如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：danalogic.co.uk/patient-portal