



清洁、更换 danalogic Actio 的细声管

清洁


首先，您可以用湿抹布擦拭细声管和耳塞。如果细声管被耳垢或其他碎片堵塞，请小心地将整个管从助听器上拔下来，将其从助听器上取下。

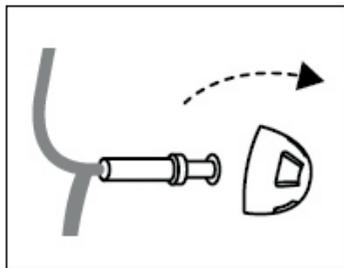

1. 接下来，将耳塞从带肋的一端拉下来。

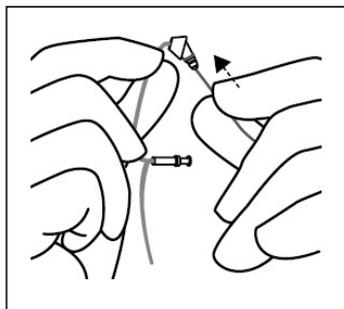


2. 现在，将清洁线穿过连接助听器的声管顶部。将清洁线完全穿过清除碎片。

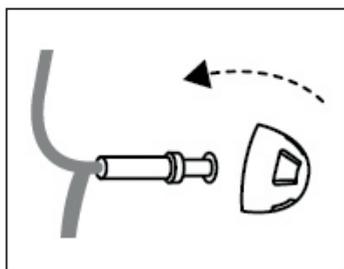


3. 将耳塞塞回细声管。

清洁、更换 danalogic Actio 的细声管 (续)

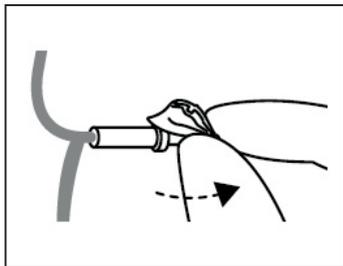

4. 小心地抬起耳塞的下部，检查耳塞是否安全并验证项圈是否完全覆盖细声管的棱状末端。

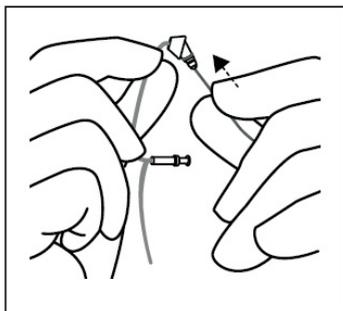

5. 最后，将细声管推回到助听器上，直到它牢固地咔咔作响。

更换

如果您需要更换细声管，请将整个声管从助听器上拔下来，并更换新的声管，确保它安装牢固到位。按照上面的说明，确保新的耳塞正确地安装到新细声管上。



如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：danalogic.co.uk/patient-portal