

程序按钮

- 您的助听器拥有 4 种不同的程序。可以使用助听器背面的顶部按钮来选择程序。您会发现按钮的一个例子可以在这里的图像中看到。
- 要更换程序, 请按按钮。哔哔声响起的次数表示正在使用的程序。
1 声哔 = 程序 1
2 声哔 = 程序 2
- 程序将按字母顺序循环。例如, 程序 2 在程序 1 的后面。
- 关闭助听器并重新打开时, 它将恢复为程序 1。



此处记录您的程序

	程序名称	使用时间
程序 1		
程序 2		
程序 3		
程序 4		



如需进一步技术支持, 请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站: danalogic.co.uk/patient-portal