


# 音量控制 - 切换键

音量控制可用于调高或调低助听器音量。

1. 要调高音量，请按切换键的上端。
2. 要调低音量，请按切换键的下端。

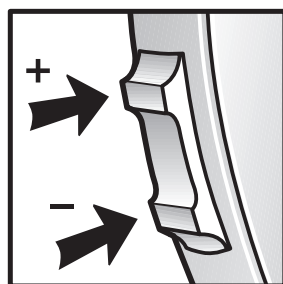

增加或减少音量时，您每次按键都将听到哔哔声。达到音量范围的上限或下限时，您将听到双重哔哔声。这是暂时的音量变化，当您重新启动助听器时，它将恢复到您的听力学家设置的音量。如果您想使用“收藏”功能保存这些音量控制设置，请使用 BeMore 应用程序进行操作。



如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)