

ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ

ਕੰਨ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੜੋ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਊਟਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।



ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਘਮਾਓਦਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।




ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਨ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਟਿਕਾਏ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ(ਨਿਰੰਤਰ)

ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਟਕਣ ਦਿਓ।

ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

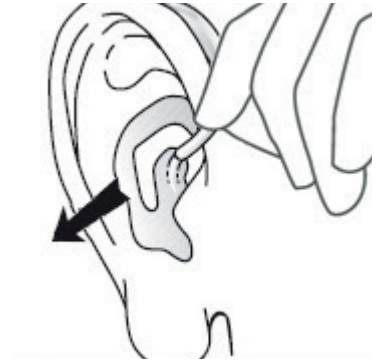

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: danalogic.co.uk/patient-portal