

ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬੱਟਨ

- ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪਛਿਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਤੇ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਨ ਕਾਥੇ ਮਲਿੰਗਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਪਾਂ ਦੀ ਗਣਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਚਿ ਹੋ।
 - 1 ਬੀਪ = ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1
 - 2 ਬੀਪਾਂ = ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 2, ਆਦਿ।
- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਕ੍ਰਮ ਵਚਿ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 2 ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੇਗਾ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ।



ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ:

	ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ	ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 1		
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 2		
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 3		
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ 4		



ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ: danalogic.co.uk/patient-portal