



Чистка и замена тонкого звуковода для слуховых аппаратов danalogic Actio

Чистка


Сначала вы можете протереть тонкий звуковод и колпачок влажной тканью. Если тонкий звуковод забит ушной серой или другими загрязнениями, снимите его со слухового аппарата, аккуратно вытащив звуковод полностью из слухового аппарата.

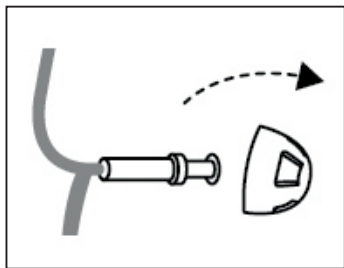

1. Затем снимите колпачок с конца с резьбой, потянув его.

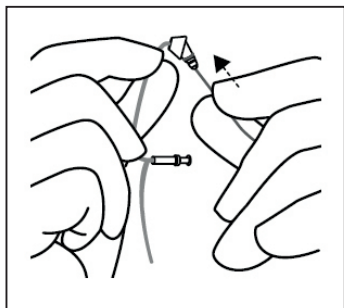


2. Вставьте чистящий стержень через верх тонкого звуковода в том месте, где он соединяется со слуховым аппаратом. Протолкните чистящий стержень по всей длине, чтобы удалить все загрязнения.

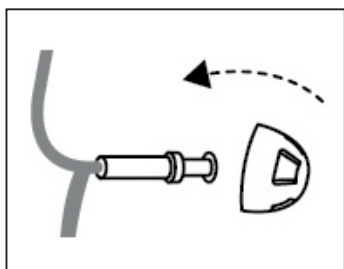


3. Затем снова установите колпачок на тонкий звуковод.

Чистка и замена тонкого звуковода для слуховых аппаратов danalogic Actio (продолжение)

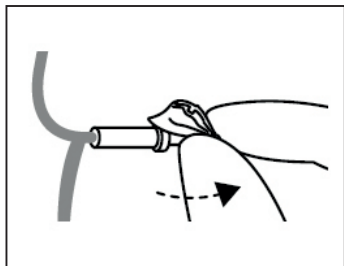

4. Убедитесь, что колпачок установлен плотно, осторожно приподняв нижнюю часть колпачка и проверив, что «шейка» полностью покрывает конец тонкого звуковода с резьбой.

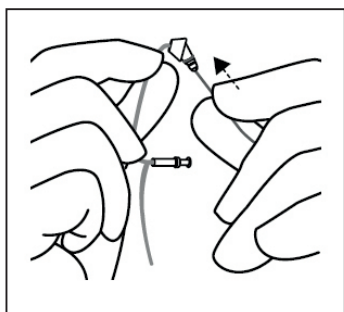

5. Наконец, снова соедините тонкий звуковод со слуховым аппаратом, пока он плотно не встанет на место до щелчка.

Замена

Если вам нужно заменить тонкий звуковод, вытащите его полностью из слухового аппарата и замените новым, чтобы он плотно встал на место до щелчка. Для установки нового колпачка на новый тонкий звуковод выполняйте описанные выше действия.



Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:
danalogic.co.uk/patient-portal