


# Регулировка громкости – кнопка

Функция регулировки громкости позволяет увеличить громкость звука в вашем слуховом аппарате или уменьшить ее.

1. Для увеличения громкости нажмите на верхнюю часть кнопки.
2. Для уменьшения громкости нажмите на нижнюю часть кнопки.

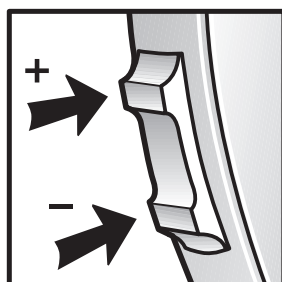

Когда вы увеличиваете или уменьшаете громкость, каждый раз при нажатии на кнопку вы услышите звуковой сигнал. Когда вы достигнете верхнего или нижнего предела диапазона громкости, вы услышите двойной звуковой сигнал. Эти изменения громкости являются временными, и, когда вы перезагружаете свой слуховой аппарат, громкость возвращается на уровень, установленный аудиологом. Если вы хотите сохранить эти настройки громкости, используйте приложение BeMore, функцию «Избранное».



Для получения дополнительной помощи отсканируйте QR-код или зайдите на наш портал помощи пациентам:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**