



Очищення та заміна тонких трубок для danalogic Actio

Очищення


Спочатку протріть тонку трубку і купол вологою ганчіркою. Якщо тонка трубка засмічена сіркою або іншим сміттям, видалить її зі слухового апарату, обережно витягнувши всю трубку зі слухового апарату.

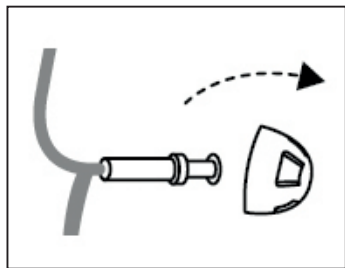

1. Потім зніміть купол, потягнувши його за ребристий кінець.

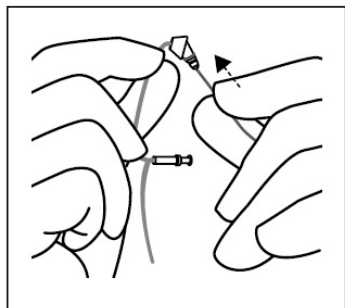


2. Тепер просуньте дрiт для чищення через верхню частину тонкої трубки, де вона з'єднується зі слуховим апаратом. Протягніть дрiт для чищення до кінця, щоб повністю видалити будь-яке сміття.

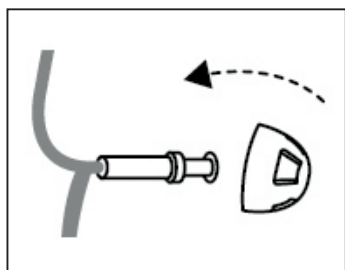


3. Тепер вставте купол назад на тонку трубку.

Очищення та заміна тонких трубок для danalogic Actio (продовження)

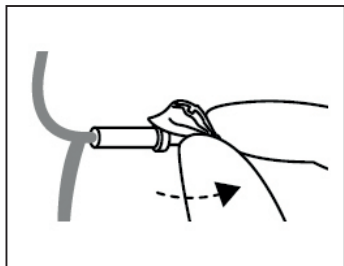

4. Переконайтеся, що купол надійно закріплений, обережно піднявши нижню частину купола і переконавшись, що манжета повністю закриває ребристий кінець тонкої трубки.

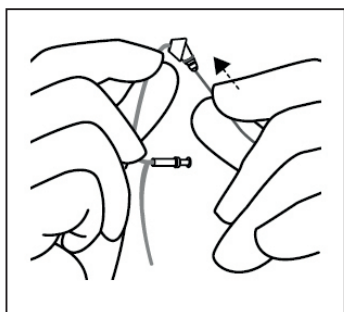

5. Нарешті, вставте тонку трубку назад у слуховий апарат, доки вона не зафіксується з характерним клацанням.

Заміна

Якщо вам потрібно замінити тонку трубку, витягніть всю трубку зі слухового апарату і замініть її новою, переконавшись, що вона надійно вставлена на місце. Дотримуйтесь наведених вище інструкцій, щоб забезпечити правильне встановлення нового купола на нову тонку трубку.



Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:
danalogic.co.uk/patient-portal