


# Вставлення та зняття вкладиша

Щоб вставити вкладиш, затисніть його між великим і вказівним пальцями і розташуйте звуковий вихід у вушному каналі.



Вставте вкладиш у вухо до упору легким обертальним рухом. Переконайтеся, що верхня частина вкладиша захована за складкою шкіри над вушним каналом.

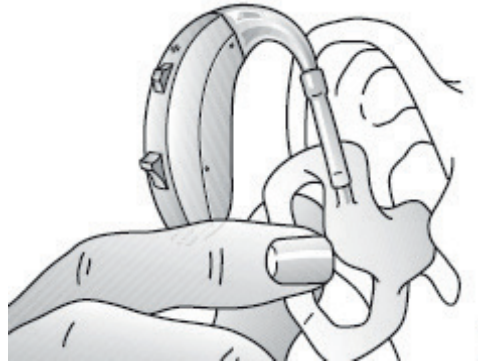


Після встановлення вкладиша просуньте слуховий апарат вперед, а потім відсуньте його назад, щоб він зручно розташувався за вухом.

Деяким людям допомагає дзеркало, і після правильного встановлення вкладиша він повинен сидіти щільно, але комфортно.

## Вставлення та зняття вкладиша (продовження)

Щоб зняти вкладиш, підніміть слуховий апарат з-за вуха і дайте йому звисати поруч з вухом.

Обережно витягніть вкладиш з вуха великим і вказівним пальцями. Можливо, вам доведеться злегка покрутити вкладиш, щоб повністю зняти його.

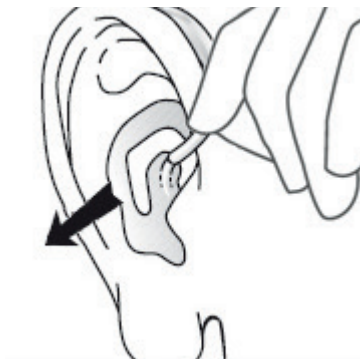

Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**

Правильний вибір для Національної  
служби охорони здоров'я

UK 09.02 B 9.2022

**danalogic** GN