

Кнопка «Програми»

- Ваші слухові апарати можуть мати до 4 різних програм. Програми можна вибирати за допомогою кнопки на задній панелі слухових апаратів. Приклад того, де ви можете знайти кнопку, можна побачити на зображенні тут.
- Щоб змінити програму, натисніть на кнопку. Кількість звукових сигналів, які ви чуєте, вказує на те, в якій програмі ви перебуваєте.

1 сигнал = Програма 1

2 сигнали = Програма 2,

- Програми будуть циклічно змінюватися по порядку. Наприклад, програма 2 буде слідувати за програмою 1.
- Коли ви вмикаєте та вимикаєте слухові апарати, вони завжди повертаються до програми 1.



Записуйте свої програми сюди:

	Назва програми	Коли використовувати
Програма 1		
Програма 2		
Програма 3		
Програма 4		



Для отримання додаткової підтримки відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів за посиланням:
danalogic.co.uk/patient-portal

Правильний вибір для Національної
служби охорони здоров'я

danalogic GN