

نقص کی ازالہ کاری کی گائیڈ برائے قابل ریچارج آلہ سماعت

علامت	سبب	ممکنہ تدبیر
آواز کا نہ آنا	• آلہ سماعت کا آن نہ ہونا	• ہٹن • 5 سیکنڈز کے لیے دبائے رکھیں
	• آلہ سماعت کی چارجنگ ختم ہو جانا	• اپنا چارجر مرکزی سوئچ میں لگائیں اور آلہ سماعت کو چارجر میں رکھیں
	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کا بند ہو جانا	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کی صفائی کریں
	• ایئر مولڈ کی ٹیوب کی پانی کی وجہ سے بندش	• اپنے آلہ سماعت سے ایئر مولڈ الگ کریں اور ایئر مولڈ کو ہلائیں تاکہ کسی قسم کا پانی نکل جائے۔ ایئر مولڈ کو اپنے آلہ سماعت کے ساتھ دوبارہ جوڑنے سے قبل گرم خشک جگہ پر 15 منٹ کے لیے رکھیں
ٹھیک اونچی آواز نہیں آتی	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کو غلط طریقے سے لگانا	• اپنی پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کو دوبارہ لگائیں
	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ / گنبد نما پلگ کا بند ہو جانا	• اپنی پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ صاف کریں / گنبد نما پلگ تبدیل کریں
	• مسدود کردہ ویکس فلٹر	• ویکس فلٹر تبدیل کریں
	• آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنائی میں تبدیلی آئی ہے	• اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں
	• کان میں ویکس کا زیادہ جمع ہونا	• اپنے GP یا پریکٹس نرس سے رابطہ کریں

نقص کی ازالہ کاری کی گائیڈ (گزشتہ سے پیوستہ)

علامت	سبب	ممکنہ تدبیر
	• آواز کا والیوم کم مقدار پر سیٹ ہونا	• اگر آپ کے آلہ سماعت کے پیچھے آواز کے بٹن موجود ہیں تو ان سے یا BeMore ایپ کے ذریعے آواز بڑھائیں
بہت زیادہ سیٹیاں بچنا / فیڈبیک	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کی غلط فٹنگ	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کو دوبارہ لگائیں
	• کان میں ویکس کا زیادہ جمع ہونا	• اپنے GP یا پریکٹس نرس سے رابطہ کریں
	• پتلی ٹیوب / ایئر مولڈ کی ٹیوب کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا یا خراب ہو جانا	• پتلی ٹیوب تبدیل کریں/ایئر مولڈ کی ٹیوب تبدیل کریں
آواز کا خراب/ واضح نہ ہونا	• ایئر مولڈ یا گنبد نما پلگ کو غلط لگانا	• اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں
	• آلہ سماعت خراب ہو گیا ہے	• اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں
	• آلہ سماعت کی ترتیبات ٹھیک نہیں ہیں	• BeMore ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں یا اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں

اگر کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں جو یہاں مذکور نہیں کیے گئے، تو براہ کرم اپنے مقامی شعبہ آڈیولوجی سے رابطہ کریں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: danalogic.co.uk/patient-portal

