

Beth yw dolen glyw?

Math arbennig o system sain a gaiff ei defnyddio gan bobl â chymhorthion clyw yw dolen sain (a gaiff ei galw weithiau'n ddolen sain anwythol) Mae'r ddolen glyw yn anfon signal di-wifr magnetig y bydd y cymorth clyw yn ei glywed pan fydd ar y gosodiad 'T' (Telecoil).



Mae'r ddolen glyw yn cynnwys microffon ar gyfer clywed pobl yn siarad; mwyhadur sy'n prosesu'r signal a gaiff ei anfon wedyn drwy'r teclyn yn y pen draw; cebl y ddolen, sef gwifren a gaiff ei gosod o amgylch perimedr ardal benodol, e.e. ystafell gyfarfod, eglwys, cownter gwasanaeth ac ati, er mwyn gweithredu fel antena sy'n anfon y signal magnetig i'r cymorth clyw. Mae systemau dolen personol hefyd ar gael (a gaiff eu gwisgo o gwmpas y gwddf) a gellir eu defnyddio gyda chwaraewyr MP3, setiau teledu a rhai ffonau llinell tir, er enghraifft.

Pam defnyddio dolen glyw?


- Mae'n cael gwared ar unrhyw sŵn cefndir dieisiau
- Nid oes angen defnyddio derbynnnydd/clustffon
- Mae'r sain yn mynd yn uniongyrchol i'r cymorth clyw
- Gall unrhyw un sydd â chymorth clyw cydnaws ei defnyddio
- Gall nifer diderfyn o bobl ddefnyddio'r system

Noder: mae'r rhan fwyaf o gymhorthion clyw yn gydnaws â'r system dolen, ond nid yw'r nodwedd wedi'i throi ymlaen yn ddiofyn. Gofynnwch i'ch Awdiolegydd alluogi hyn.


Systemau isgoch

Dewis arall yn lle systemau dolen yw systemau isgoch. Maent yn cynnwys trawsyrrydd a derbynnydd (neu nifer o dderbynnyddion). Mae'r trawsyrrydd yn anfon y signal i'r derbynnydd, sy'n ei drosi'n signal sain a gaiff ei fwydo i glustffon neu ddolen gwddf.

Isod ceir diagram o ddolen glyw ar gownter mewn siop neu fanc

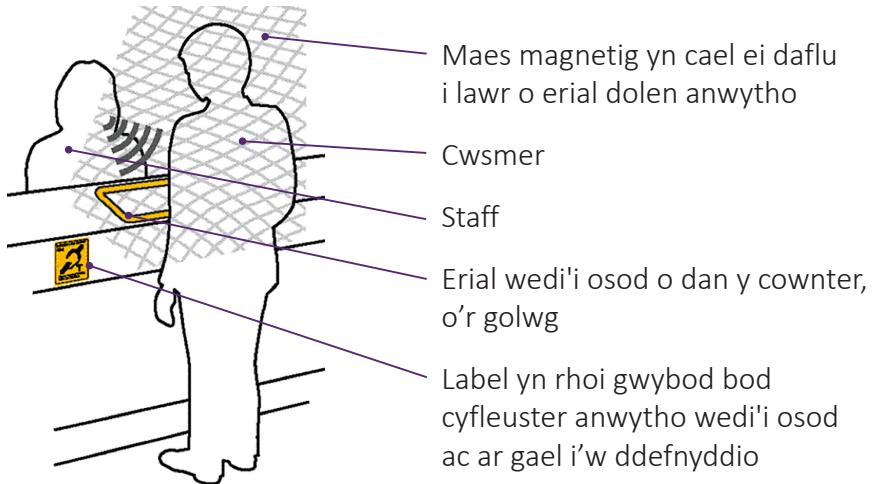

Isod ceir diagram o ddolen glyw mewn ystafell (e.e. mewn digwyddiad, man addoli ac ati)

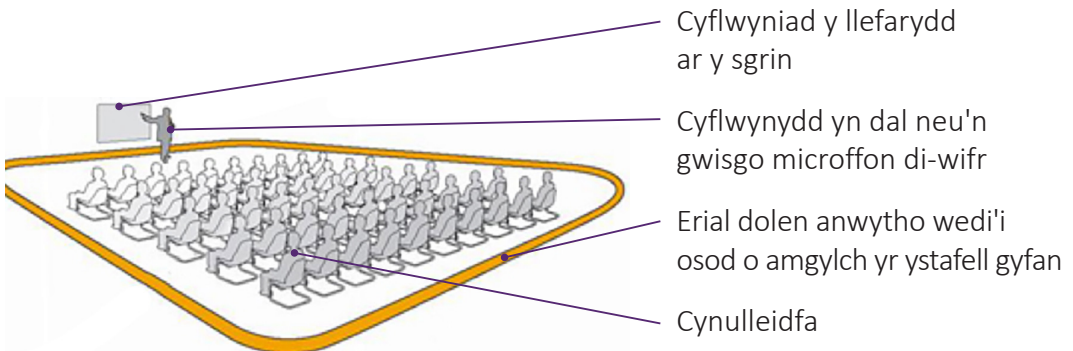

Gwybodaeth a diagramau gan Hearing Link – ar gael yn www.hearinglink.org

Y dewis cywir ar gyfer y GIG

danalogic GN