


Rheoli lefel y sain – tog!

Bydd y tog! lefel sain yn eich galluogi i godi neu ostwng lefel sain eich cymhorthion clyw.

1. I godi lefel y sain, pwyswch ben uchaf y tog!
2. I ostwng lefel y sain, pwyswch ben isaf y tog!

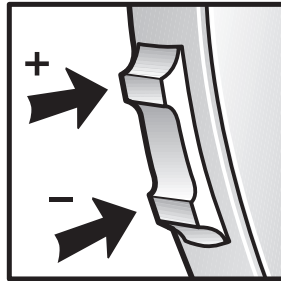

Pan fyddwch yn codi neu'n gostwng lefel y sain, byddwch yn clywed bîp bob tro y byddwch yn pwysu'r tog!. Pan fyddwch wedi codi neu ostwng lefel y sain yr holl ffordd, byddwch yn clywed bîp dwbl. Newidiadau dros dro fydd y newidiadau hyn i lefel y sain. Pan fyddwch yn ailgychwyn eich cymorth clyw, bydd y sain yn dychwelyd i'r lefel a osodwyd gan eich Awdiolegydd. Defnyddiwch y nodwedd 'Favourite' o fewn ap BeMore os hoffech gadw'r gosodiadau lefel sain hyn.



I gael rhagor o gymorth, sganiwch y cod QR neu ewch i'n porth cymorth i gleifion yn: danalogic.co.uk/patient-portal