

# سلامة البطارية

إذا تم ابتلاع بطاريات متخذة شكل أزرار، فقد تسبب ضررًا خطيرًا أو الوفاة. وقد تسبب أيضًا إصابات جسيمة إذا استقرت في الأنف أو الأذن.

**الحفاظ على سلامة بطاريات أجهزة المساعدة السمعية:**

**إذا ساورك شك في أن طفلك أو أحد أقاربك ابتلع بطارية متخذة شكل زر:**

- انقله مباشرة إلى أقرب قسم طوارئ أو اتصل بالرقم ٩٩٩ لطلب سيارة إسعاف.
- أخبر طاقم المستشفى أنك تشك في أن طفلك/قريبك ابتلع بطارية متخذة شكل زر.
- اصطحب معك بطارية مشابهة وعبوتها؛ فهذا من شأنه المساعدة على تحديد نوع البطارية المتبلعة وتيسير العلاج.
- لا تسمح لطفلك/قريبك بالأكل أو الشرب.
- لا تثر اشمئزازه.
- يجب عليك الذهاب إلى قسم الحوادث والطوارئ (A&E) حتى لو لم تظهر أي أعراض على طفلك/قريبك.
- احتفظ بالبطاريات الجديدة/الاحتياطية في عبوتها الفقاغية الأصلية في حاوية محكمة الغلق. احتفظ بها بعيدًا عن مرأى ومتناول الأطفال والبالغين الضعفاء.
- عند فتح عبوة البطارية، توخ العناية للتأكد من عدم سقوطها على الأرض.
- أعد تدوير البطاريات بأمان وفي أسرع وقت ممكن.
- يتم أحيانًا الخلط عن طريق الخطأ بين البطاريات وحبوب الدواء؛ لذا، يتعين على المرضى التحقق من أدويتهم بعناية قبل ابتلاع أي حبوب، ويتعين الاحتفاظ بالبطاريات في مكان مختلف عن الأدوية.
- احتفظ بأجهزة المساعدة السمعية (حتى تلك المزودة بأقفال بطارية ضد عبث الأطفال) بعيدًا عن مرأى ومتناول الأطفال الصغار والبالغين الضعفاء عند عدم استخدامها.

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

