


# تنظيف الأنابيب الرفيعة واستبدالها في أجهزة Ambio Smart و Ambio


## التنظيف

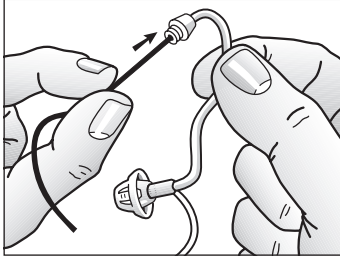

- 1- أزل الأنبوب الرفيع من جهاز المساعدة السمعية بلفه في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- 2- امسح الأنبوب الرفيع والقبة بقطعة قماش رطبة.
- 3- ادفع الآن سلك التنظيف عبر الجزء العلوي من الأنبوب الرفيع حيث يتصل بجهاز المساعدة السمعية. مرر سلك التنظيف بالكامل لإزالة أي فضلات تمامًا.

## نصيحة مهمة:

يجب استبدال الأنبوب الرفيع والقباب عندما تصبح المكونات صلبة أو هشة أو مفتولة.

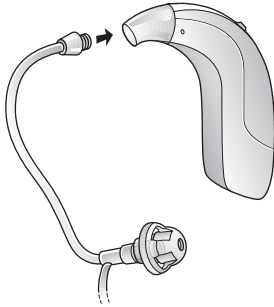

## الاستبدال

- 1- أزل الأنبوب الرفيع من جهاز المساعدة السمعية بلفه في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
- 2- ركب الأنبوب الرفيع البديل بلفه في اتجاه حركة عقارب الساعة.

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة  
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

