



إدخال الأنابيب الرفيعة وإزالتها


١- ابدأ بتعليق جهاز المساعدة السمعية فوق قمة أذنك.

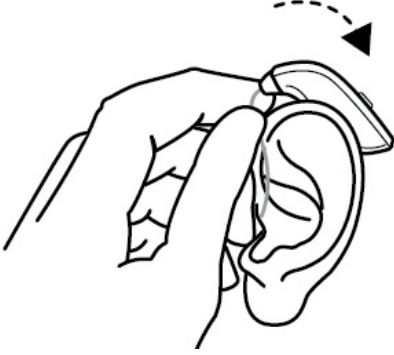

٢- احمل بعد ذلك الأنبوب حيث ينتهي وادفع القبة برفق داخل قناة أذنك.

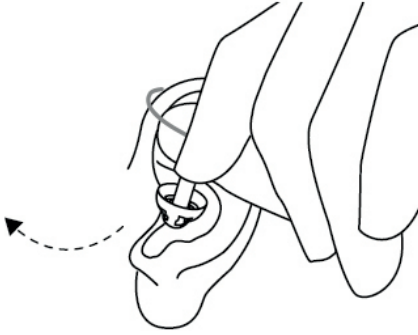

٣- ادفع القبة مسافة كافية داخل قناة أذنك بحيث يستقر الأنبوب بشكل مستوي على رأسك.

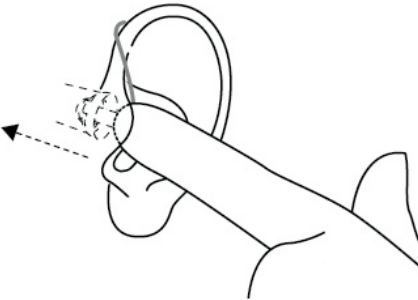


٤- أخيراً، يوجد كبل احتجاز في كل أنبوب ويجب وضعه داخل تجويف أذنك.

إدخال الأنابيب الرفيعة وإزالتها (تابع)



٥- لإزالة جهاز المساعدة السمعية، ارفع الجهاز أولاً من أذنك.

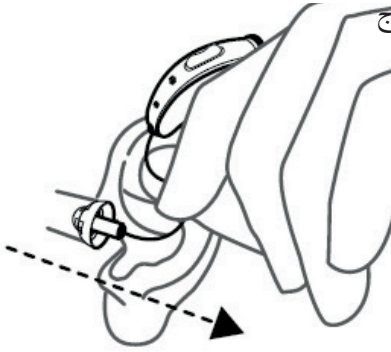

٦- احمِل بعد ذلك الأنبوب حيث ينتهي وادفعه برفق خارج قناة أذنك.

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: danalogic.co.uk/patient-portal

