


كيفية تشغيل أجهزة المساعدة السمعية وإيقاف تشغيلها وتغيير البطارية

التشغيل

عندما تكون البطارية بالداخل، أغلق غطاء حجيرة البطارية بالكامل لتشغيل أجهزة المساعدة السمعية.

إيقاف التشغيل

افتح غطاء حجيرة البطارية حتى تشعر بنقرة لإيقاف تشغيل جهاز المساعدة السمعية.

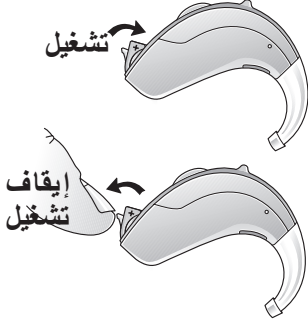

تغيير البطاريات

عند انخفاض طاقة البطارية

- ستصدر أجهزة المساعدة السمعية صفيرًا عندما توشك طاقة البطارية عن النفاد.
- سيتكرر هذا الصفير التحذيري كل ١٥ دقيقة حتى تنفذ طاقة البطارية بالكامل.

كيفية تشغيل أجهزة المساعدة السمعية وإيقاف تشغيلها وتغيير البطارية (تابع)



لتغيير البطارية

- أزل الملصق من البطارية الجديدة.
- افتح غطاء حجيرة البطارية.
- أخرج البطارية المستعملة عن طريق سحبها لأعلى.
- أدخل البطارية الجديدة في مكانها. وتأكد من اتجاه الجانب المسطح (المميز بعلامة +) لأعلى.

نصيحة مهمة:

لترشيد طاقة البطارية، تأكد من إيقاف تشغيل جهاز المساعدة السمعية عند عدم استخدامه.

للحصول على مزيد من الدعم، امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة QR أو تفضل بزيارة
بوابتنا الإلكترونية لدعم المرضى عبر الرابط: danalogic.co.uk/patient-portal

