




Как да смените тръбичката на шаблона за ухо

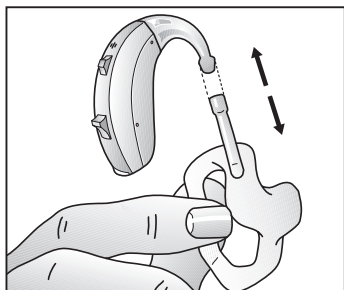


1. Отстранете шаблона за ухо от слуховия апарат и издърпайте тръбичката от шаблона.

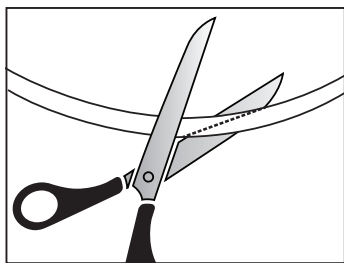

2. Отрежете приблизително последните 5 cm от предварително огънатата тръбичка до конусовиден край.

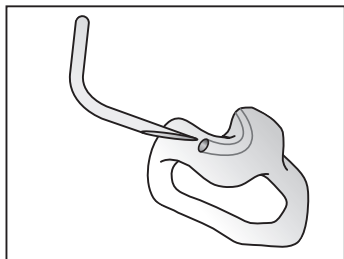


3. Вкарайте острия край през отвора в шаблона за ухо от външната страна, както е показано, докато се появи от другия край. Ако в шаблона за ухо има два отвора, вкарайте тръбичката през по-големия отгоре.

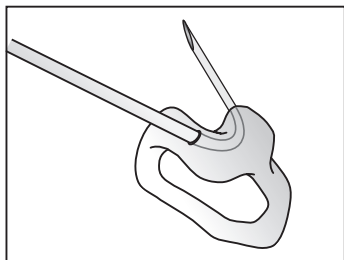


4. Издърпайте острия край на тръбичката през шаблона за ухо, докато другият край на тръбичката застане вертикално и прилегне плътно към шаблона.


Как да смените тръбичката на шаблона за ухо (продължение)

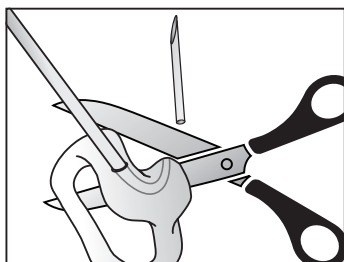

5. Отрежете острия край колкото може по-близо до шаблона за ухо. Уверете се, че няма стърчащи неравни ръбове на тръбичката, тъй като те могат да предизвикат дразнене на ухото.

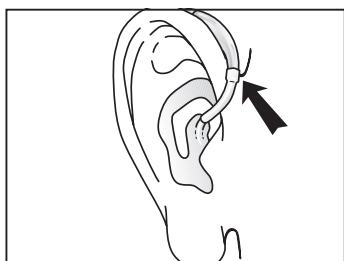

6. Сега трябва да регулирате дължината на тръбичката, така че да пасва на ухото. Поставете старата тръбичка (която сте отстранили по-рано) до тръбичката, която ще поставяте, отмерете и отрежете. Или поставете слуховият апарат на ухото и отбележете мястото, където тя го пресича, както е показано, и отрежете.

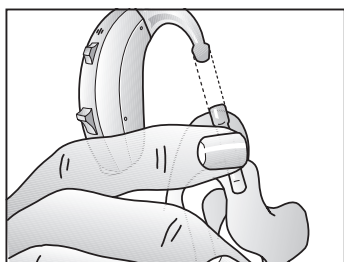

7. За да прикрепите отново слуховия апарат към шаблона за ухо, стиснете горния край на тръбичката и съединете шаблона за ухо и слуховия апарат.

ТОП СЪВЕТ: *С течение на времето тръбичката може да се втвърди, обезцвети или да стане чуплива. Обикновено се препоръчва тя да се подменя поне веднъж на всеки 6 месеца. Ако имате някакви въпроси относно смяната на тръбичката на шаблона за ухо, моля, свържете се с Вашия местен аудиолог.*



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:

danalogic.co.uk/patient-portal