

Програмен бутон

- Вашият слухов апарат може да има до 4 различни програми. Програмите могат да се избират с помощта на бутона отзад на слуховия апарат. Пример за мястото, на което ще намерите бутона, можете да видите на изображението тук.
- За да сменяте програмите, натискайте бутона. Броят на бипканията, които чувате, указва програмата, която се изпълнява.

1 бипкане = Програма 1

2 бипкания = Програма 2 и т.н.

- Програмите се превъртат циклично по реда на номерата. Например, програма 2 следва след програма 1.
- Когато изключвате и включвате отново слуховите си апарати, те винаги се връщат на програма 1.



Програмен бутон

Запишете програмите си тук:

	Име на програмата	Кога да я използвате
Програма 1		
Програма 2		
Програма 3		
Програма 4		



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal