


Регулатор на силата на звука – двупозиционен превключвател

Регулаторът на силата на звука позволява силата на звука на вашите слухови апарати да се увеличава или намалява.

1. За да увеличите силата на звука, натискайте двупозиционния превключвател в горния край.
2. За да намалите силата на звука, натискайте двупозиционния превключвател в долния край.

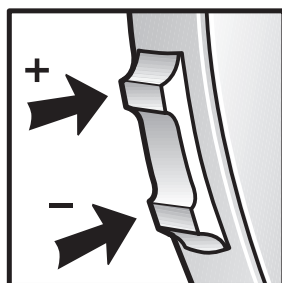

Когато увеличавате или намалявате силата на звука, при всяко натискане се чува бипкане. Когато достигнете горната или долната граница на диапазона за силата на звука, ще чуете двойно бипкане. Промените на силата на звука са временни и когато рестартирате слуховия си апарат, той ще се върне към силата на звука, настроена от Вашия аудиолог. Използвайте приложението VeMore, ако искате да запазите тези настройки за силата на звука, като използвате функцията „Favourite“ (Предпочитани).



За допълнителна помощ сканирайте QR кода или посетете нашия портал за поддръжка на пациенти на адрес:
danalogic.co.uk/patient-portal