




Čištění a výměna hadiček pro Ambio a Ambio Smart

Čištění

1. Odeberte hadičky z vaší sluchové pomůcky tak, že je vyšroubujete otáčením proti směru otáčení hodinových ručiček.
2. Otřete hadičku a hlavici vlhkým hadříkem.
3. Nyní zastrčte čisticí drát vrchní částí hadičky, kde je připojena ke sluchové pomůcce. Prostrčte čisticí drát kompletně hadičkou, abyste zcela odstraniliveškeré nečistoty.

TIP:

System hadiček s hlavicí by měl být vyměněn za nový, pokud jsou jednotlivé díly neohebné, křehké nebo se krotí.

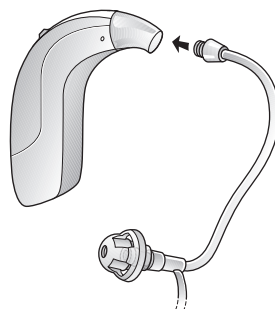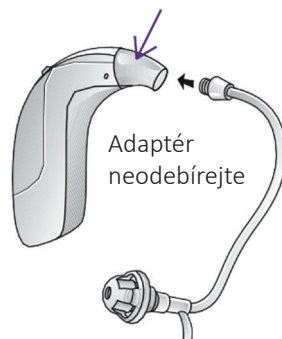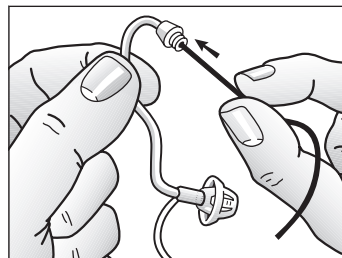

Výměna

1. Odeberte hadičky z vaší sluchové pomůcky tak, že je vyšroubujete otáčením proti směru otáčení hodinových ručiček.
2. Připevněte náhradní hadičku tak, že ji našroubujete ve směru hodinových ručiček.



Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:
danalogic.co.uk/patient-portal