

Nasazování a vyndávání ušních tvarovek

Za účelem zasunutí ušní tvarovky ji uchopte mezi palec a ukazováček a umístěte zvukový výstup do zvukovodu.



Jemným krouživým pohybem zasuňte ušní tvarovku celou do ucha. Zajistěte, aby se horní část ušní tvarovky zachytila za kožní řasu nad zvukovodem.




Jakmile je ušní tvarovka na svém místě, vysuňte sluchovou pomůcku vpřed a pak ji zasuňte zpět tak, aby pohodlně seděla za vaším uchem.

Některým lidem pomáhá při zasouvání ušní tvarovky zrcadlo, jakmile je tvarovka správně na místě, má sedět pohodlně a příjemně.

Nasazování a vyndávání ušních tvarovek (pokračování)

Pro odebrání ušní tvarovky, zvedněte sluchovou pomůcku ze svého ucha a nechte ji viset vedle ucha.

S pomocí palce a ukazováčku opatrně uvolněte tvarovku ze svého ucha. Abyste ušní tvarovku zcela vyjmuli, bude možná zapotřebí jí opatrně otáčet.

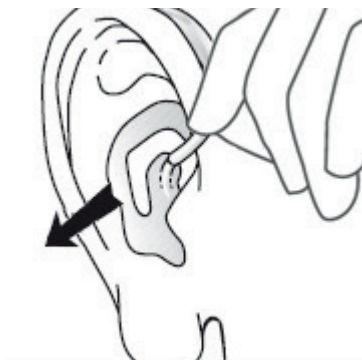

Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese:
danalogic.co.uk/patient-portal