



# Vkládání a odebírání hadiček


1. Začněte tím, že si zavěsíte sluchovou pomůcku shora na uši.

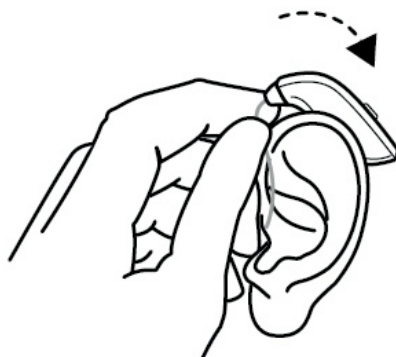

2. Pak přidržte hadičku tam, kde se ohýbá a opatrně ji vložte do svého zvukovodu.

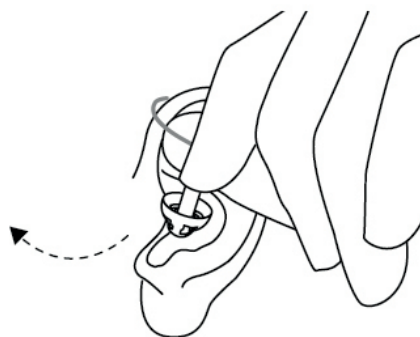

3. Zastrčte hlavičku dostatečně hluboko do svého zvukovodu tak, že zbytek hadičky je v jedné rovině s vaší hlavou

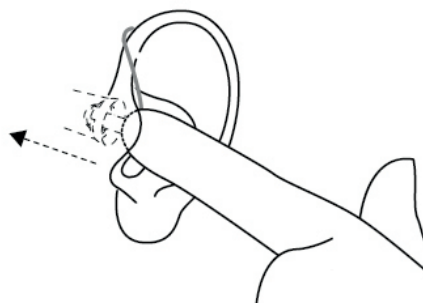


4. Na každé hadičce je navíc přidržovací kablík, který musí být vložen do boltce

## Vkládání a odebírání hadiček (pokračování)

5. Pro vyjmutí sluchové pomůcky ze všeho nejdříve zvedněte pomůcku ze svého ucha.



6. Pak přidržte hadičku tam, kde se ohýbá a opatrně ji vytáhněte svého zvukovodu.

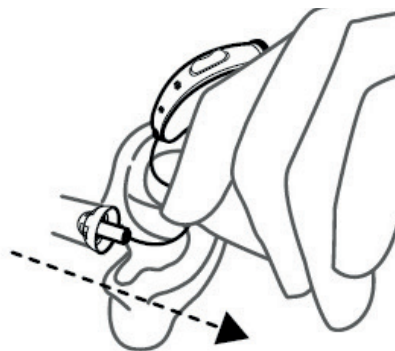

Za účelem další technické pomoci naskenujte QR kód a navštivte náš portál podpory pacientů na adrese: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)