

电池安全

如果吞食纽扣电池，可能产生成严重危害甚至死亡。如果它们卡在鼻子或耳朵里，也会产生严重的危害。

如果您怀疑您的孩子或亲属吞下了纽扣电池：

- 直接带他们去最近的急诊科或拨打 999 叫救护车。
- 告诉医院工作人员，您认为您的孩子/亲属吞下了纽扣电池。
- 带上类似的电池和包装。这有助于医生识别所吞食电池的类型，方便治疗。
- 不要让您的孩子或亲属吃喝任何东西。
- 不要让他们呕吐。
- 即使您的孩子或亲属没有任何症状，您也需要去急诊科。

保管好助听器电池：

- 将新的/备用电池保存在原来的泡罩包装中，并保存在密封容器中。把它们放在儿童和易受伤的成年人看不到和够不到的地方。
- 打开电池包装时，注意不要让电池掉到地上。
- 尽快安全回收电池。
- 电池偶尔会被误认为药丸。因此，患者在吞下药片前应仔细检查药物，电池应与药物放在不同的地方。
- 不使用助听器时，请将助听器(即使是装有防儿童电池锁的助听器)放在幼儿和易受伤成年人的视线和接触不到的地方。



如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：danalogic.co.uk/patient-portal