


耳模的佩戴和取出

若要插入耳模，用拇指和食指捏住耳模，然后将其出声口置于耳道中。

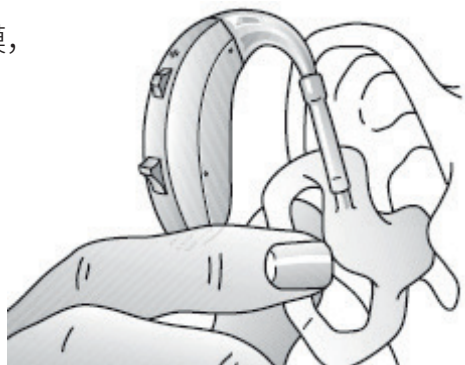

轻轻地转动耳模，将其一直滑入耳中。确保耳模的顶部塞在耳道上方皮肤褶皱的后面。




一旦放好耳模，向前推动助听器，然后将其向后滑动，以便将助听器舒适地安放在你的耳朵后面。

有人发现使用镜子能够帮助插入耳模，一旦耳模放置正确，您会感到贴合舒适。

耳模的佩戴和取出 (续)

要取出耳模，请将助听器从耳后提起，让它垂在耳朵旁边。

用拇指和食指轻轻地把耳模从耳朵上拉下来。您可能需要稍微转动耳模才能完全取出。

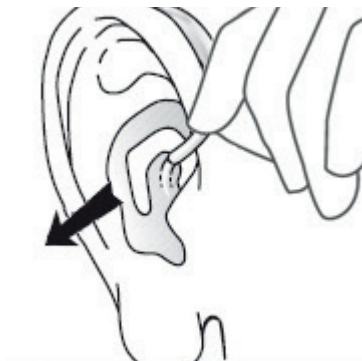

如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：danalogic.co.uk/patient-portal