


如何开启和关闭助听器，以及如何更换电池

开启

插入电池后，完全关闭电池仓，即可开启助听器。

关闭助听器

打开电池仓直至发出咔嗒声，即可关闭助听器。

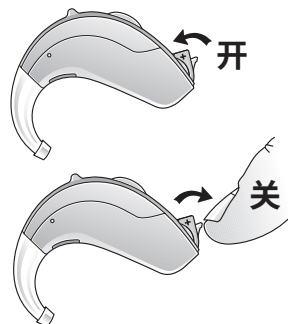

更换电池


电池电量不足时

- 电池快用完时，助听器会发出嘟嘟声。
- 此警告声将每15分钟重复一次，直至电池完全耗尽。

如何开启和关闭助听器，以及如何更换电池（续）

更换电池

- 撕下新电池上的不干胶标签。
- 打开电池仓。
- 向上拉旧电池，将其取出。
- 将新电池插入。确保平的一面（标有+）朝上。

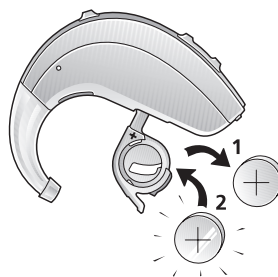

重要提示:

为了省电，请确保在不使用助听器时将其关机。



如需进一步技术支持，请扫描二维码或访问我们的患者支持门户网站：danalogic.co.uk/patient-portal