

# Bezpieczeństwo baterii

W przypadku połknięcia baterie guzikowe mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Mogą one również powodować znaczne obrażenia, jeśli utkną w nosie lub uchu.

## Jeśli podejrzewasz, że Twoje dziecko lub krewny połknął baterię guzikową:

- Zabierz go prosto do najbliższego oddziału ratunkowego lub zadzwoń pod numer 999 po karetkę.
- Poinformuj personel szpitala, że uważasz, że Twoje dziecko / krewny połknął baterię guzikową.
- Zabierz ze sobą podobną baterię i opakowanie. Pomoże to lekarzowi określić rodzaj połkniętej baterii i ułatwi leczenie.
- Nie pozwalaj dziecku/ krewnemu jeść ani pić.
- Nie pozwól im zachorować.
- Należy zgłosić się na ostry dyżur, nawet jeśli dziecko / krewny nie wykazuje żadnych objawów.

## Dbanie o bezpieczeństwo baterii do aparatów słuchowych:

- Nowe/zapasowe baterie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu blistrowym w szczelnym pojemniku. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnej opieki.
- Otwierając opakowanie z bateriami, należy uważać, aby nie spadły na podłogę.
- Utylizuj baterie bezpiecznie i jak najszybciej.
- Baterie niekiedy były mylone z tabletkami. Dlatego pacjenci powinni dokładnie sprawdzić lek przed połknięciem jakichkolwiek tabletek, a baterie powinny być przechowywane w innym miejscu niż leki.
- Przechowuj nieużywane aparaty słuchowe (nawet te wyposażone w blokadę baterii zabezpieczającą przed dziećmi) w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci i osób dorosłych wymagających szczególnej opieki.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:  
**[danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)**

Właściwy wybór dla NSZ

**danalogic** GN