



Czyszczenie i wymiana dźwiękowodów dla Ambio i Ambio Smart

Czyszczenie

1. Wyjmij dźwiękowód z aparatu słuchowego, odkręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Przetrzyj dźwiękowód i kopułkę wilgotną szmatką.
3. Teraz przełóż przewód czyszczący przez górną część dźwiękowodu, gdzie łączy się on z aparatem słuchowym. Całkowicie przeciągnij przewód czyszczący, aby w pełni usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

NAJLEPSZA WSKAZÓWKA:

Dźwiękowód i kopułki powinny być wymienione, gdy elementy staną się sztywne, kruche lub zagięte.

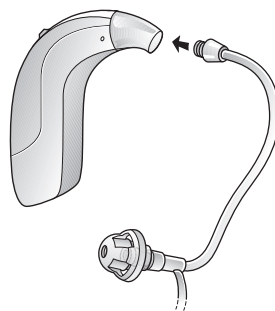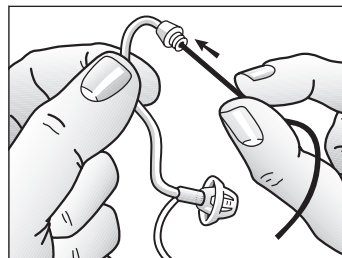

Wymiana

1. Wyjmij dźwiękowód z aparatu słuchowego, odkręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Zamocuj zamienny dźwiękowód przykręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:
danalogic.co.uk/patient-portal