

Zakładanie i zdejmowanie wkładek usznych

Aby włożyć wkładkę uszną, przytrzymaj ją między kciukiem a palcem wskazującym i umieść wylot dźwięku w przewodzie słuchowym.



Delikatnym ruchem obrotowym wsuń wkładkę do ucha. Upewnij się, że górna część wkładki usznej jest schowana za fałdem skóry nad przewodem słuchowym.




Po założeniu wkładki usznej, przesunąć aparat słuchowy do przodu, a następnie zsunąć go do tyłu, aby wygodnie ułożyć go za uchem.

Niektórym osobom korzystanie z lusterka pomaga w zakładaniu wkładki usznej, a po jej prawidłowym założeniu powinna być ona dopasowana ciasno, ale wygodnie.

Zakładanie i zdejmowanie wkładek usznych (ciąg dalszy)

Aby zdjąć wkładkę uszną, podnieś aparat słuchowy zza ucha tak, aby zwisał obok niego.

Za pomocą kciuka i palca wskazującego delikatnie wyciągnij wkładkę uszną z ucha. W celu całkowitego wyjęcia wkładki usznej może być konieczne jej lekkie przekręcenie.

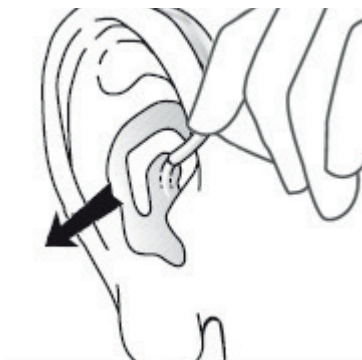

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, zeskanuj kod QR lub odwiedź nasz portal wsparcia dla pacjentów pod adresem:
danalogic.co.uk/patient-portal